

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ HIGH RISK AC-101

Οδηγίες Χρήσης

Χαρακτηριστικά

- ◆ Εύκολο στη χρήση.
- ◆ Φορητό και ελαφρύ.
- ◆ Σωληνωτό στρώμα PVC - EN71.

Οδηγίες τοποθέτησης

1. Τοποθετήστε την αντλία σε οριζόντια θέση ή κρεμάστε την στο κρεβάτι από τους ειδικούς γάντζους που βρίσκονται στην αντλία.
2. Τοποθετήστε το στρώμα στο κρεβάτι και ασφαλίστε το διπλώνοντας τα άνω και κάτω πτερύγια κάτω από το στρώμα του κρεβατιού.
3. Συνδέστε τους σωλήνες τροφοδοσίας αέρος με τις εξόδους αέρα της αντλίας. Σιγουρευτείτε ότι οι σωλήνες δεν έχουν διπλωθεί ή παραμορφωθεί.
4. Τοποθετήστε την ηλεκτρική αντλία σε κατάλληλη παροχή ρεύματος και ενεργοποιείστε την συσκευή. Το φωτάκι λειτουργίας θα πρέπει τώρα να είναι αναμμένο.
5. Απαιτούνται 20 λεπτά για να φουσκώσει πλήρως το στρώμα.
6. Σκεπάστε το στρώμα με ένα σεντόνι και εφαρμόστε χαλαρά.
7. Ρυθμίστε τον έλεγχο πίεσης σύμφωνα με τις οδηγίες του ειδικού ιατρού.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Αντλία	Στρώμα
Τάση: 220V/50Hz	Διαστάσεις: 190cm(M) x 88cm(Π) x 11cm(Y)
Παροχή: 5 lt/min.	17 σωλήνες Nylon / PU
Όρια πίεσης: 40 mmHg – 100 mmHg	Κάλυμμα Nylon / PU
Χρόνος κύκλου: 12 min.	Υλικό βάσης Nylon / PVC
Κατανάλωση: 7W	Χρώμα: Μπλε
Διαστάσεις: 24cm(M) x 12cm(Π) x 9.5cm(Y)	Ύψος σωλήνα: 11cm
Βάρος: 1.4 kg	Μέγιστο βάρος ασθενούς: 140 kg

Οδηγίες Καθαρισμού

- ◆ Το στρώμα μπορεί να καθαριστεί με απολυμαντικό διάλυμα
- ◆ Μη βυθίζετε την αντλία σε νερό
- ◆ Αποφεύγετε γενικά τις υψηλές θερμοκρασίες (πχ κλιβάνους)

Εγγύηση μοτέρ: 2 έτη