

Νοσοκομειακή Κλίνη Μονόσπαστη με ρόδες

AC-403W

Εγχειρίδιο Χρήσης

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή
2. Περιγραφή Εξαρτημάτων
3. Οδηγίες Συναρμολόγησης Κλίνης
4. Χρήση της Μανιβέλας
5. Φροντίδα και Συντήρηση
6. Χαρακτηριστικά

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η κλίνη έχει σχεδιαστεί για εσωτερική χρήση. Είναι σχεδιασμένη για μέγιστο βάρος χρήστη 135 κιλά. Διαθέτει τροχούς 5" με φρένο και μπορεί να μετακινηθεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση από τον φροντιστή.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Η κλίνη διαθέτει **μετώπες πλάτης και ποδιών και σκελετό από ατσάλι**, με εποξική βαφή. Η πλάτη ρυθμίζεται από την μανιβέλα. Διαθέτει επίσης στατώ ορού ως εξάρτημα. **Το στατώ ορού είναι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος.**



3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΛΙΝΗΣ


Οι μετώπες, το στατώ ορού και η μανιβέλα έρχονται συσκευασμένα με το σκελετό της κλίνης. Συναρμολογήστε σύμφωνα με τα παρακάτω βήματα.




Βήμα No.1 Συναρμολογήστε την μανιβέλα και βιδώστε την πάνω στον σκελετό της κλίνης όπως φαίνεται στην εικόνα.



Βήμα No 2 Βιδώστε την μανιβέλα με την πλάτη της κλίνης όπως φαίνεται στην εικόνα.

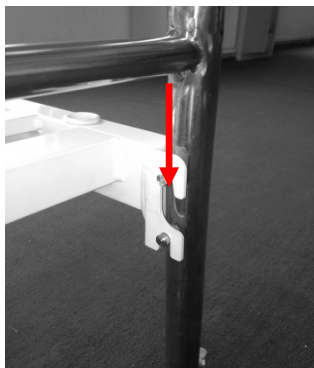


Βήμα No 3 Ανασηκώστε τον σωμιά και τοποθετήστε τον στις μετώπες όπως φαίνεται στην εικόνα.

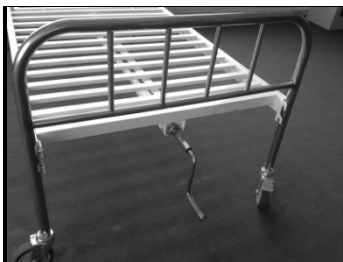


Βήμα No 4 Τοποθετείστε την
μικρή μετώπη στο κάτω
μέρος της κλίνης και στην
πλευρά τηςμανιβέλας.



Βήμα No 7 Τοποθετήστε το
στατώ ορού σε όποια από τις
τέσσερις οπές στις άκρες τις
κλίνης επιθυμείτε.

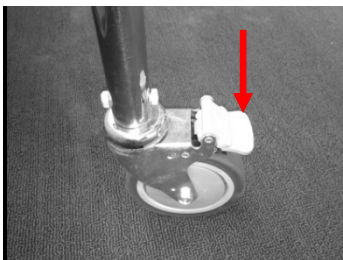

Βήμα No 8 Ασφαλίστε τα
φρένα όταν τοποθετήσετε την
κλίνη στην θέση της.

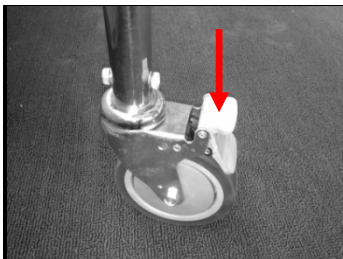


Βήμα No 9 Απασφαλίστε
τα φρένα αν θέλετε να
μετακινήσετε την κλίνη.

4. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΝΙΒΕΛΑΣ


Χρησιμοποιήστε την μανιβέλα για να ανυψώσετε την πλάτη σε γωνία από (0° έως 75°)
χειροκίνητα.

Κατέβασμα πλάτης.

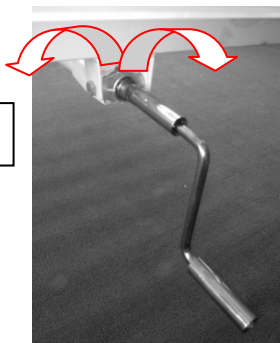

Ανύψωση πλάτης

Τραβήξτε την λαβή της μανιβέλας προς τα έξω και διπλώστε την προς τα μέσα μόλις ολοκληρώσετε την ανύψωση.

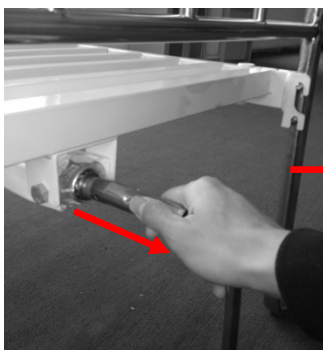

5. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν από κάθε χρήση της κλίνης πρέπει να ελέγχονται οι μετώπες και οι τροχοί με τα φρένα τους.
- Η κλίνη πρέπει να αποθηκεύεται σε στεγανό μέρος και μακριά από τον ήλιο. Όταν την αποθηκεύετε μπορείτε να αφαιρείτε τις μετώπες.
- Διατηρείτε την κλίνη καθαρή με ένα υγρό πανί και μακριά από σκόνη.
- Ο χρήστης πρέπει να ελέγχει περιοδικά τα παρακάτω εξαρτήματα, τα οποία πρέπει να επισκευάζονται, αντικαθίστανται ή λιπαίνονται αν χρειαστεί:
 1. Τροχοί.
 2. Μανιβέλα.
 3. Μετώπες.
 4. Στατώ
 5. Βίδες.

6. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο AC-403W	Διαστάσεις
Μετώπη πλάτης (ΜxΠxΥ)	M900 X W320 X Y820 χιλ.
Μετώπη ποδιών (ΜxΠxΥ)	M900 X Π320 X Υ720 χιλ.
Διαστάσεις κλίνης (ΜxΠxΥ)	2060x900x550 χιλ.
Βάρος	33kg
Μέγιστο βάρος ασθενούς	135kg

Σημείωση:

Μην ξεπερνάτε ποτέ το συνολικό βάρος των 135 κιλών καθώς υπάρχει κίνδυνος βλάβης και σοβαρού τραυματισμού.

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

- Η εταιρεία μας σας παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας της νοσοκομειακής κλίνης για χρονικό διάστημα ενός(1) ετών από την ημερομηνία αγοράς.**
- Η εγγύηση καλύπτει ελαττώματα των υλικών και της κατασκευής και περιλαμβάνει τόσο τα υλικά όσο και την εργασία επισκευής
- Σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται σε κατασκευαστικό σφάλμα, η εταιρεία θα επισκευάσει ή αντικαταστήσει τα ελαττωματικά εξαρτήματα ή θα αντικαταστήσει ολόκληρη την ελαττωματική συσκευή σύμφωνα πάντα με την κρίση του τεχνικού της.
- Η εγγύηση ισχύει μόνον εφόσον επιδειχθεί η νόμιμη απόδειξη αγοράς της συσκευής όπου και θα αναφέρεται η ημερομηνία αγοράς.
- Η διάρκεια της εγγύησης (1 έτος) παρατείνεται ύστερα και μόνον από την σύμφωνη γνώμη της εταιρείας.
- Τα έξοδα μεταφοράς της κλίνης προς και από το συνεργείο βαρύνουν αποκλειστικά τον αγοραστή.
- Απαγορεύεται η μεταβίβαση της εγγυήσεως σε τρίτα πρόσωπα.

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ:

- Κλίνες που επισκευάστηκαν από τον αγοραστή ή άλλα μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
- Εξαρτήματα που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά όπως μανιβέλα, ρόδες, κλπ.

3. Βλάβες που οφείλονται σε αμέλεια του αγοραστή, κακή χρήση, συντήρηση και αποθήκευση.
4. Συσκευές που δεν χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως.
5. Βλάβες που προκλήθηκαν κατά την μεταφορά στο συνεργείο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΟΝΟΜΑ :

ΕΠΩΝΥΜΟ :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :

ΠΟΛΗ :

S/N :

ΘΕΣΗΣΦΡΑΓΙΔΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

...../...../.....

CE