

Οδηγίες Χρήσεως

TIMESULIN κατάλληλο για Flextouch / Levemir / NovoRapid / Tresiba / Saxenda

ΒΗΜΑ 1

ΤΡΑΒΗΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΕΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ TIMESULIN

Όταν λάβετε το **TIMESULIN**, θα έχει μια μικρή πλαστική γλωττίδα, η οποία προστατεύει την μπαταρία. Ενεργοποιήστε την μπαταρία αφαιρώντας την πλαστική προστατευτική γλωττίδα και ο χρονοδιακόπτης στο καπάκι **TIMESULIN** θα αρχίσει να αναβοσβήνει στις 00:00

Χορηγήστε την ένεση ινσουλίνης και, στη συνέχεια, αντικαταστήστε το έξυπνο καπάκι **TIMESULIN** στην πένα ινσουλίνης.



ΒΗΜΑ 2

ΒΑΛΤΕ ΤΟ TIMESULIN ΣΤΟ ΣΤΥΛΟ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Το έξυπνο καπάκι θα αρχίσει αμέσως να μετρά τα δευτερόλεπτα, ξεκινώντας από ένα δευτερόλεπτο (00:01) και μετρά έως και μία ώρα. Μετά από μία ώρα, η λειτουργία χρονοδιακόπτη θα αλλάξει από MM: SS σε HH: MM και θα εκτελεστεί έως 99 ώρες και 59 λεπτά.

Θυμηθείτε να καλύψετε ή να αλλάξετε τη βελόνα μεταξύ κάθε ένεσης, ώστε να μην διαρρεύσει ινσουλίνη μέσα στο **Timesulin** σας.



ΒΗΜΑ 3

ΤΟ TIMESULIN ΞΕΚΙΝΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΝΑ ΜΕΤΡΑΕΙ

Για να ενεργοποιήσετε ξανά το χρονόμετρο, απλώς αφαιρέστε το καπάκι για περισσότερο από 8 δευτερόλεπτα και ξεκινήστε από την αρχή! Έχουμε ενσωματώσει καθυστέρηση 8 δευτερολέπτων στην επαναφορά του έξυπνου καπακιού **TIMESULIN**. Αυτό θα σας επιτρέψει να αφαιρέσετε το καπάκι - για να ελέγξετε τα επίπεδα ινσουλίνης της πέννας σας κατά την έξοδο για δείπνο, για παράδειγμα - χωρίς να επαναφέρετε το χρονόμετρο



Σχόλια Χρηστών



BIOAXIS[™]
Healthcare

Diabetes